

【MiHMSアップグレード】アラート機能のリリースのお知らせ (Version 3.1)

声だけで簡単に心の状態を可視化する「マインドヘルス計測システム(Version 3.1)」に、好不調の状態を知らせるアラート機能を、6月22日よりリリースいたしました。また、グループユーザー版の管理者向けダッシュボードには、グループメンバーのアラート有無を確認する一覧表示機能をリリースいたしました。

アラートの発生条件

アラートは、マインドアクティビティが、以下の3つの条件のいずれかに抵触した場合には表示されます。

- 5日間連続で値が低下している
- 7日間で値が20ポイント以上低下している
- 3日間連続して、値が20ポイントを下回る


(注1) アラートの抵触判定には、過去14日間のうち、7日間以上の計測回数が必要です。

(注2) 同日に複数回の計測を実施した場合は、当該日における最低値でアラートの有無が判定されます。

アラートの表示

個人ユーザー版（グループユーザー版の個人向けアプリケーションも含む）：

計測後の各指標が表示される画面において、コンディションを表示します。なお、計測を伴わずに、随時、アラート内容を表示させる機能は、近日中に追加することを予定しています。

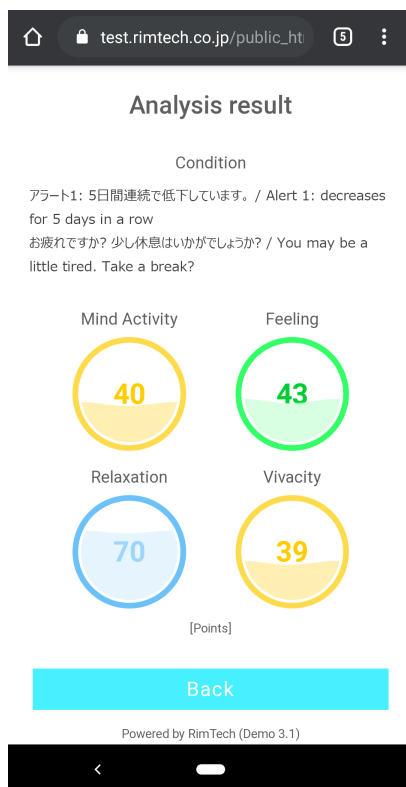



イメージ2

グループユーザー版

複数人で共通デバイスを使用する際のプライバシーに配慮して、アラートは簡易的に表示します。なお、個人所有のスマートフォン等で計測する場合は、上記の個人ユーザー版と同じ表示になります。




イメージ3

ダッシュボード

管理者向けダッシュボードでは、グループメンバー全員の状態を「Condition list」で確認することができます。アラートが出ているメンバーは緑色でハイライトされ、視覚的な確認を容易としています。また、「過去14日間で一度も計測

を実施していない」、「過去14日間で計測回数が7日間未満」のユーザーも確認することができます。

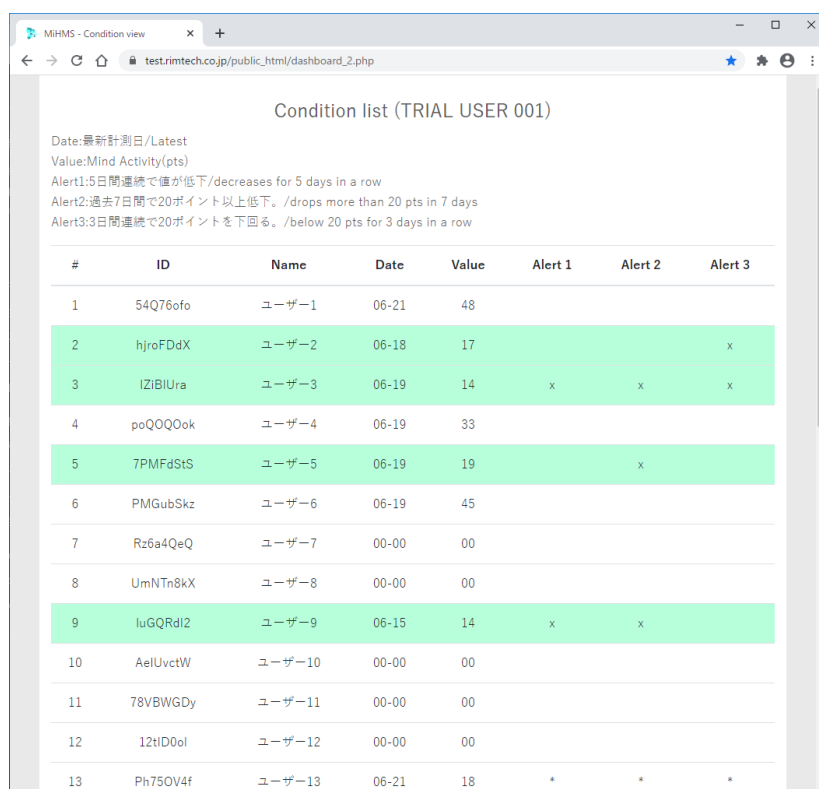

Condition list (TRIAL USER 001)

Date:最新計測日 / Latest
Value: Mind Activity (pts)
Alert1: 5日間連続で値が低下 / decreases for 5 days in a row
Alert2: 過去7日間で20ポイント以上低下。 / drops more than 20 pts in 7 days
Alert3: 3日間連続で20ポイントを下回る。 / below 20 pts for 3 days in a row

#	ID	Name	Date	Value	Alert 1	Alert 2	Alert 3
1	54Q76ofo	ユーザー-1	06-21	48			
2	hJroFDdX	ユーザー-2	06-18	17			x
3	lZiBIUra	ユーザー-3	06-19	14	x	x	x
4	poQOQOok	ユーザー-4	06-19	33			
5	7PMFdStS	ユーザー-5	06-19	19		x	
6	PMGubSkz	ユーザー-6	06-19	45			
7	Rz6a4QeQ	ユーザー-7	00-00	00			
8	UmNTn8kX	ユーザー-8	00-00	00			
9	luGQRdlZ	ユーザー-9	06-15	14	x	x	
10	AeIUvctW	ユーザー-10	00-00	00			
11	78VBWGDy	ユーザー-11	00-00	00			
12	12tID0ol	ユーザー-12	00-00	00			
13	Ph75OV4f	ユーザー-13	06-21	18	*	*	*

イメージ4

(注3) イメージ1-4は開発中のものであり、実際の画面とは若干異なる点に留意ください。

会社概要

リスク計測テクノロジーズ株式会社

URL: <https://rimtech.co.jp/>

関連リンク

【導入ガイド】 マインドヘルス計測システム

URL: <https://rimtech.co.jp/index.php/2020/04/08/blog010/>

[ログイン(サインアップ)] マインドヘルス計測システム

<https://rimtech.co.jp/index.php/mihms/>

本件に対するお問い合わせ先

当社Webサイトの「Contact us」よりお問い合わせください。

URL : <https://rimtech.co.jp/index.php/inquires/>

リスク計測テクノロジーズ株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/57103

声だけで簡単に心の状態を可視化する「マインドヘルス計測システム」について、ZoomやTeamsを使用した説明を随時実施しています。お気軽にご連絡を頂ければ幸いです。