

Quick Filler **FLEX**


クイック

フィラー

フレックス

シリンジに集中! 確実・安全! スピードアップ!

デザイン保護寄託済み

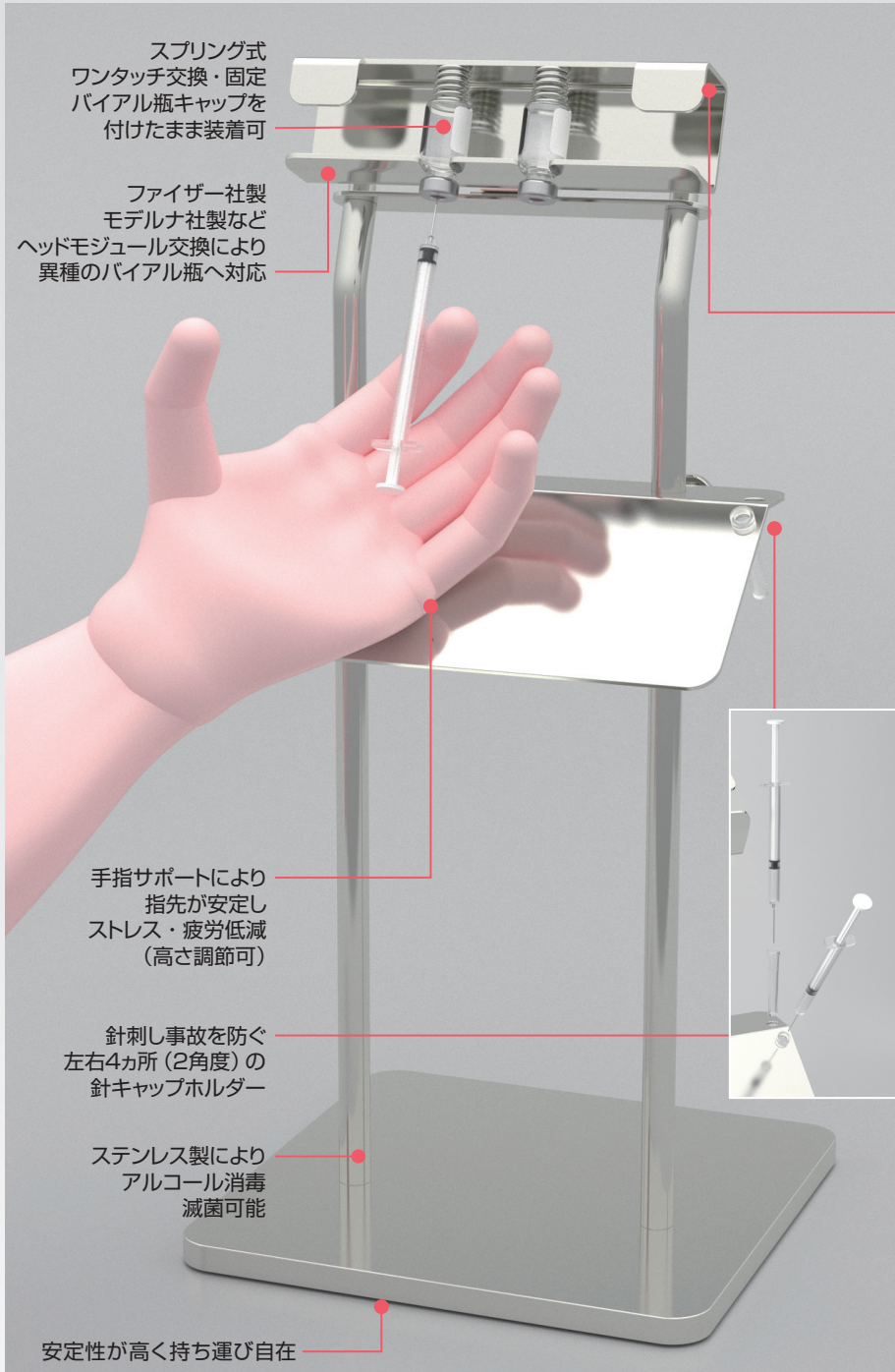

スプリング式
ワンタッチ交換・固定
バイアル瓶キャップを
付けたまま装着可

ファイザー社製
モデルナ社製など
ヘッドモジュール交換により
異種のバイアル瓶へ対応

手指サポートにより
指先が安定し
ストレス・疲労低減
(高さ調節可)

針刺し事故を防ぐ
左右4か所(2角度)の
針キャップホルダー

ステンレス製により
アルコール消毒
滅菌可能



安定性が高く持ち運び自在

針先が指に向かわない

バイアル瓶を温めない

高度な手技を必要としないため、
人材確保・持ち回りの幅が拡大

瓶角度の調節ヒンジを搭載
ゴム栓の直視、泡沫の解消、
良好な針先視界の確保を容易に

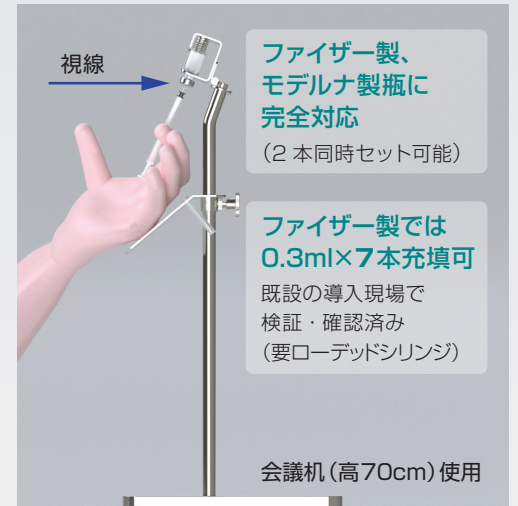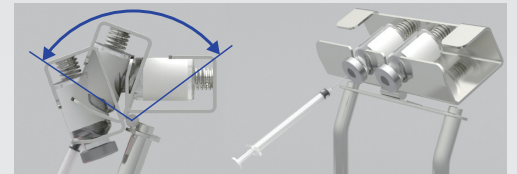

視線

ファイザー製、
モデルナ製瓶に
完全対応

(2本同時セット可能)

ファイザー製では
0.3ml×7本充填可

既設の導入現場で
検証・確認済み
(要ローデッドシリンジ)

会議机(高70cm)使用

仕様

本体寸法	W200×H420×D200
材質	SUS304
重量	5.5kg

プレスリリース



商品規格

品名	入数	型式	JANコード
クイックフィラーフレックス ファイザー	1式	QFF-P2-1	4589413370697
クイックフィラーフレックス モデルナ	1式	QFF-M2-1	4589413370703
QFフレックス交換パーツ ファイザー	1式	QFF-P2-P1	4589413370711
QFフレックス交換パーツ モデルナ	1式	QFF-M2-P1	4589413370727

交換パーツは従来型のホルダー部をフレックスタイプに出来ませ(工具付)



職域接種・個別接種・集団接種ご担当の皆様へ

新型コロナワクチン接種につきましては施策推進、ご努力に感謝申し上げます。

医療機器メーカーである弊社は、ワクチン接種の現場を支える医療スタッフ様を支援し、誰でも、より確実・安全で、清潔、スムーズにワクチン接種を進めていただけますようバイアル瓶ホルダー「Quick Filler FLEX」を開発いたしました。

医療スタッフ様のパフォーマンスを上げられます。

様々な集団接種、大規模集団接種、職域接種、個別接種会場で導入いただいております*。

ファイザー製・モデルナ製ともにそれぞれの対応器を開発済みです。

『助かっています!』
お声をいただいています


※ モデルナ対応実績【職域接種実績企業】富士通株、東京海上日動火災保険株、フラザー工業、関東 ITソフトウェア健康保険組合、徳竹中工務店、徳ウエルネストコミュニケーションズ、大分市保健所（敬称略）

【大規模接種会場】京都市大規模接種会場

ファイザー対応実績【大規模接種会場】新潟市大規模接種会場

【集団接種会場・個別接種会場】上川町（北海道）、能代市（秋田県）、大崎市（宮城県）、久慈市（岩手県）、奥州市（岩手県）、邑楽町（群馬県）、五泉市（新潟県）、小牧市（愛知県）、相楽郡南山城村（京都府）、精華町（京都府）、木津川市（京都府）、藍里病院（徳島県）、川崎町（福岡県）、栗園村（沖縄県）

本機購入費用をワクチン接種にかかわる経費として算入が可能である旨は内閣官房大臣室に確認済みです。

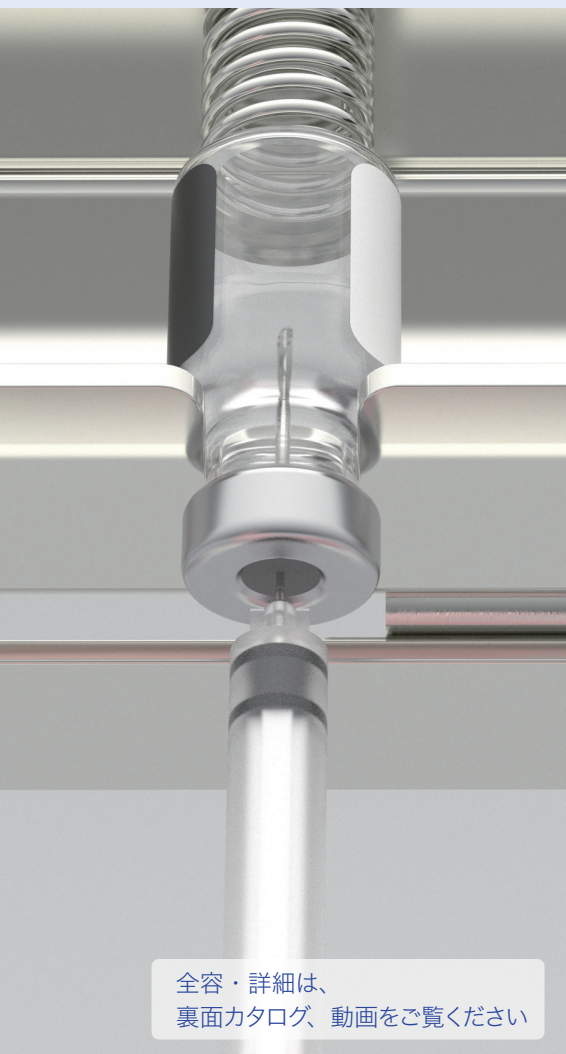

全容・詳細は、
裏面カタログ、動画をご覧ください

COVID-19 ワクチン対応

Quick Filler FLEX
クイック フィラー フレックス

- シリンジのみを両手で持つことで、計量操作が容易で確実、**分注作業のストレス・疲労を軽減・改善**します。
- 瓶とシリンジを同時に持つ手技を必要としないため、**分注作業の安全性、効率・スピード**が上がり、**接種現場の人的ローテーションを容易**にします。
- 下部に薬剤が集まり 0.3ml×7本採取も**短時間**で行えます。**ワクチン準備数と接種者数の偶発的不一致の解消**など、**柔軟な対応に威力を発揮し、会場運営が安定化**します。
（希釈済みファイザーワクチンは粘ちょう性があります）
- 瓶のセットによる手順の見える化が、**ミス低減**に繋がります。

従来型のクイックフィラー6瓶タイプのスタンド支柱は互換モジュール設計です。
クイックフィラー フレックスのヘッド部分のみをご購入いただき、交換可能です。

Quick Filler FLEX 紹介動画



ご予約、価格、納期、
試用貸出等の
お問い合わせフォーム



三田理化メディカル株式会社は創業以来
医療従事者のサポートや患者 QOL の向上を目指し
医療現場における様々な課題を
アイデアと工夫で解決する商品開発を進めています

RACoon Medical

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-13-102

千種潤也（ちぐさじゅんや）

TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

mail jchigusa@racoon-medical.co.jp