

変異株3種類それぞれを数値で報告！

8月中旬よりご予約を
ECサイトにて受付中！

オミクロンBA5,BA2,BA1 対応

理化学研究所の技術を使用した

変異株抗体検査


『変異株抗体検査』は、

ワクチン接種後、抗体量の推移を数値で管理できる
新型コロナウイルス抗体検査に、変異株に対する
抗体量の検査をプラスしました。

ワクチン打ったけど...大丈夫？
イージードク
変異株抗体検査抗体検査キット EasyDoc



申込後、届いた採血セットを使って自分で採血して返送するだけ。
専門のスタッフがあなたの血液中にある抗体を測定します。

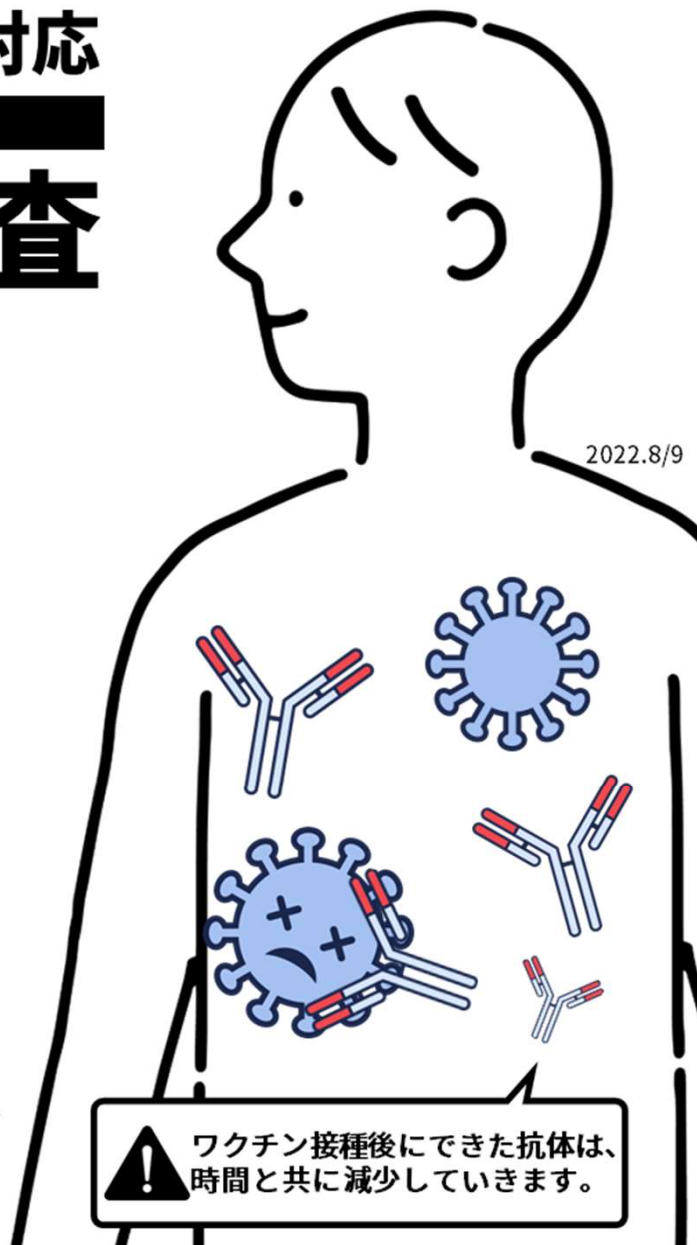

2022.8/9

検査結果はサイトで確認！

※抗体量の低下が続いた場合は、医師にご相談ください

- ① ワクチン接種後の残存効果(抗体量)を数値で報告
陽性/陰性しか判別できない簡易キットと違い、抗体が少なくても測定されます
- ② オミクロンBA5,BA2,BA1の各抗体量をグラフ表示
RBDに結合する抗体(中和抗体になりうる抗体)を測定します
- ③ 直近の感染歴もわかります(オプション販売)
ウイルス感染によってできた抗体(NP)も測定します

販売開始は9月上旬予定！

ご予約済のお客様へは、先着順で順次発送いたします。

価格: 9,900円
(税込)

お問合せ・お申込みは下記サイトから

<https://easydoc.jp/>



運営及び検査会社: 株式会社プロテックス、検査会社: アール・ナノバイオ株式会社

〒351-0104 埼玉県和光市南2-3-13 和光理研インキュベーションプラザ内 TEL 048-424-5722 Mail info@prote.jp

『イージードク』を使った、かんたん抗体検査

ワクチン接種後、2週間以上経過してからの検査をお勧めします。

① 申込み

『イージードク』のサイトへアクセス <https://easydoc.jp/>
※PCでもスマホと同じ操作が可能です



② 自己採血

採血セットが届いたら、説明書の記載に沿って、自分で採血します
※採血をするときの痛みは、輪ゴムでパチンと弾いた程度だといわれています



③ 採血した検体の返送

当社指定の検査所へ、採血した検体を同封の封筒で冷蔵便にて返送してください。
※送料はお客様負担になります

④ 検査結果の報告

登録したメールアドレスへ、検査結果をお知らせいたします。
※検体到着後、土日祝日を除く5日~1週間程度で報告
(検査の混雑状況によりお時間をいただく場合があります)



よくある質問と回答



『イージードク』検査サービスとは何ですか？



病院に行かなくても自宅で検査を受けられるサービスです。



抗体価が低下するとどうなりますか？



一般的に、感染リスクが高まるといわれています。
※抗体価とは、ウイルスに対して反応する抗体の濃度とウイルスとの結合力を表す数値です



ワクチン接種後、皆同じように抗体が、体内に作られるのですか？



免疫抑制薬、ステロイドの内服者、ご高齢者、喫煙者、飲酒の頻度が高い方は、抗体ができづらいといわれています。また、抗体の減少スピードには、個人差があることが知られています。



スマホが苦手な家族がいます。代わりに申込みできますか？



代表者が複数の家族をまとめて申込みできます。手順は簡単。
検査を申込み際、各人のカルテを指示に従い入力するだけです。

ご注意

※お申込み後のキャンセル・返金はできません。自己都合により検査検体を返送されない場合も検査費用はお返しできませんので、ご確認の上、お申し込みください。
※お子様の検査は、事前に医師へご相談ください。